

Hudkrog

Gældende for varenumre: 10193

Læs denne brugsanvisning grundigt og omhyggeligt, inden du begynder at bruge dette produkt, og følg altid de givne instruktioner.

Anvendelse: Hudkrogen bør kun bruges af autoriseret, uddannet personale.

Tilsigtet anvendelse af instrumentet: Anvendes typisk til at trække væv til side, ved mindre kirurgiske indgreb.

Uegnet brug / kontraindikation af produktet: Enhver anden anvendelse end den, der er beskrevet her, er ikke i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse af instrument. Producenten hæfter ikke for skader deraf. Brugeren alene bærer risikoen.

Betjening af produktet: Hudkrogen holder sårkanterne fra hinanden, så det giver et bedre overblik over operationsområdet.

Garanti: Når det bruges korrekt og i overensstemmelse med brugervejledningen, garanterer vi dette produkt i 2 år fra købsdatoen. Kontakt din forhandler, hvis du har brug for yderligere oplysninger, eller hvis dit instrument kræver reparation.

Instruktioner:

Opbevaring og transport: Ingen specielle krav

Rengøring: Tør instrumentet af med en fugtig klud eller et overfladerensmiddel. Vær opmærksom på de koncentrationer, der er specificeret af producenten af rengøringsmidlet.

Desinfektion: Desinfektionsmidler og rengøringsmidler kan anvendes med passende koncentrationer og i overensstemmelse med producentens anvisninger. Hvis koncentrationen er for svag, vil opløsningen være ineffektiv. Hvis koncentrationen er for stærk, kan det beskadige instrumentet. Overhold de givne kontakttider! Desinfektions- og rengøringsopløsninger skal udskiftes regelmæssigt, da de mister deres effektivitet ved brug.

Sterilisering: Instrumentet kan steriliseres i en autoklave. Instrumentet er fremstillet af rustfrit stål.

Vedligeholdelse: Instrumentet behøver jævnlig vedligeholdelse.

Inspektions- og funktionstest: Undersøg visuelt for skader og slid.

Emballage: Hudkrogen er pakket individuelt i en standard polyethylenpose (plastpose).

Opbevaring: Ingen særlige krav

Bortskaffelse: Dette produkt kan bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Importør: STETOSKOP.DK, Industrivej 1, 4200 Slagelse