

## **Varenavn: Arterieklemmer**

Gældende for varenumre: 10035, 10034, 10217, 10156, 10037, 10036, 10141, 10140, 10145

Læs denne brugsanvisning grundigt og omhyggeligt, inden du begynder at bruge dette produkt, og følg altid de givne instruktioner.

**Anvendelse:** Disse nåleholdere bør kun bruges af autoriseret, uddannet personale.

**Tilsigtet anvendelse af instrumentet:** Pean / arterieklemmer bruges til at afklemme blødende kar. Findes i flere forskellige udgaver, herunder grove/fine, buede/lige, samt i forskellige størrelser

**Uegnet brug / kontraindikation af produktet:** Enhver anden anvendelse end den, der er beskrevet her, er ikke i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse af instrument. Producenten hæfter ikke for skader deraf. Brugeren alene bærer risikoen.

**Betjening af produktet:** Enheden er lavet af en grebflade i den ende og et håndtag i den anden ende. Arterieklemmer findes forskellige størrelser og modeller.

**Garanti:** Når det bruges korrekt og i overensstemmelse med brugervejledningen, garanterer vi dette produkt i 2 år fra købsdatoen. Kontakt din forhandler, hvis du har brug for yderligere oplysninger, eller hvis dit instrument kræver reparation.

### **Instruktioner:**

**Opbevaring og transport:** ingen specielle krav

**Rengøring:** Tør produktet af med en fugtig klud eller et overfladerensmiddel. Vær opmærksom på de koncentrationer, der er specificeret af producenten af rengøringsmidlet.

**Desinfektion:** Desinfektionsmidler og rengøringsmidler kan anvendes med passende koncentrationer og i overensstemmelse med producentens anvisninger. Hvis koncentrationen er for svag, vil opløsningen være ineffektiv. Hvis koncentrationen er for stærk, kan det beskadige instrumentet. Overhold de givne kontakttider! Desinfektions- og rengøringsopløsninger skal udskiftes regelmæssigt, da de mister deres effektivitet ved brug.

**Sterilisering:** Produkterne kan steriliseres i en autoklave. Produkterne er fremstillet af rustfrit stål.

**Vedligeholdelse:** Produkterne behøver jævnlig vedligeholdelse. - Produkternes lås skal olieres med hvid olie af medicinsk kvalitet.

**Inspektions- og funktionstest:** Sørg for at produktet let kan åbnes og lukkes. Undersøg visuelt for skader og slid.

**Emballage:** Arterieklemmerne er pakket individuelt i en standard polyethylenpose (plastpose).

**Opbevaring:** ingen særlige krav

**Bortskaffelse:** Dette produkt kan bortskaffes sammen med husholdningsaffald.

Importør: STETOSKOP.DK, Industrivej 1, 4200 Slagelse