

Kay Magic Patch

-

KMPCH

Disse klæbepapirer til briller, er diskrete og passer til behandling af “Lazy Eye” og medgørlig “Double Vision”.

Instruktioner:

Først skal du klippe et stykke af en Magic Patch. Det skal være større end det glas du vil sætte det på.

Pil bagsiden med filmen af og påfør den klistrede side til indersiden af glasset. Udjævn forsigtigt for at fjerne luftboblerne.

Brug en hobby kniv til at skære, der hvor glasset mødes med stellet og fjern det ekstra materiale, så klistermærket passer lige nøjagtigt på glasset.

Alternativt, kan du lave en skabelon af glasset, og klippe plasteret til den præcise størrelse som glasset har, inden du tager filmen på bagsiden af.

Puds glasset med en brille klud eller med en fugtig klud. Brille med patch må ikke vaskes i vand. Træk plastret af efter brug.

OBS: Pakken indeholder tolv 8cm x 6,5cm klistermærker, der kan bruges op til 24 gange.

© Copyright Kay Pictures Ltd All rights reserved