

Semm Spekulum

Gældende for varenumre: 10061, 10063, 10067

Læs denne brugsanvisning grundigt og omhyggeligt, inden du begynder at bruge dette produkt, og følg altid de givne instruktioner.

Anvendelse: Dette spekulum bør kun bruges af autoriseret, uddannet personale.

Tilsigtet anvendelse af instrumentet: Spekulum anvendes i forbindelse med gynækologiske undersøgelser.

Uegnet brug / kontraindikation af produktet: Enhver anden anvendelse end den, der er beskrevet her, er ikke i overensstemmelse med den tilsigtede anvendelse af instrument. Producenten hæfter ikke for skader deraf. Brugeren alene bærer risikoen.

Betjening af Semm spekulum: Dette spekulum bruges til at åbne skeden for, at visualisere resten af kønsorganerne.

Dette spekulum leveres med et specielt håndtag, der gør det muligt for den autoriserede læge, at holde instrumentet åbent med den ene hånd.

Yderligere oplysninger, vedligeholdelse, opbevaring: Opbevares på et rent og tørt sted.

Garanti: Når det bruges korrekt og i overensstemmelse med brugervejledningen, garanterer vi dette produkt i 2 år fra købsdatoen. Kontakt din forhandler, hvis du har brug for yderligere oplysninger, eller hvis dit instrument kræver reparation.

Instruktioner:

Opbevaring og transport: Ingen specielle krav.

Rengøring: Tør spekulum af med en fugtig klud eller et overfladerensemiddel. Vær opmærksom på de koncentrationer, der er specificeret af producenten af rengøringsmidlet.

Desinfektion: Desinfektionsmidler og rengøringsmidler kan anvendes med passende koncentrationer og i overensstemmelse med producentens anvisninger. Hvis koncentrationen er for svag, vil opløsningen være ineffektiv. Hvis koncentrationen er for stærk, kan det beskadige instrumentet. Overhold de givne kontakttider! Desinfektions- og rengøringsopløsninger skal udskiftes regelmæssigt, da de mister deres effektivitet ved brug.

Hamrene i sig selv kan ikke steriliseres. Desinfektion er det første trin, der skal udføres ved rengøring af forurenede genstande og materialer. Målet her er at reducere antallet af mikroorganismer og lette den efterfølgende rengøringsproces. Det er meget vigtigt at forhindre urenheder i at tørre på

instrumentet / materialet. Desinficeringsprocessen tjener også til at beskytte personalet, mens det håndterer instrumenterne, såvel som det omgivende miljø. Denne valgte desinficeringsproces skal om muligt udføres direkte på det sted, hvor instrumenterne blev brugt, og så hurtigt som muligt efter brug.

Sterilisering: Produktet kan godt steriliseres.

Vedligeholdelse: Produktet skal efterses med jævne mellemrum for at tjekke at det ikke er defekt. Fjern og udskift altid beskadigede dele.

Inspektions- og funktionstest: Undersøg visuelt for skader og slid. Før brug skal du sikre dig, at produktet fungerer som det skal.

Emballage: Dette Spekulum er pakket individuelt i en standard polyethylenpose (plastpose).

Opbevaring: Ingen særlige krav

Bortskaffelse: Bortskaf altid efter de lokale bestemmelser.

Importør: STETOSKOP.DK, Industrivej 1, 4200 Slagelse