

Tak, fordi du har købt Bionix OtoClear® øreskyllesystem.

Bionix OtoClear øreskyllesystem giver en enkel, sikker og effektiv løsning til fjernelse af ørevoks og giver samtidig patienten mindst muligt ubehag. Nøglen til dette system er OtoClear-øreskyllespidserne, der er fastgjort til enden af spidsen. OtoClear øreskyllespidser – også kaldet tips - leder 3 stråler af vand til øregangsvæggen i 30 graders vinkler og undgår direkte at påvirke trommehinden.

Dette system fra Bionix leverer større vandmængder end andre manuelle systemer. Vandet leveres i spredte stråler, så det er effektivt og let at anvende.

Denne manual instruerer i korrekt montering og anvendelse af sættet, inklusive flaskesamling, rengøring og placering af spidsen.

Bemærk: Enhver anden brug af produktet, ud over den tilsigtede anvendelse, der er angivet heri, kan ikke holdes ansvarlig for Bionix.

Kom godt i gang:

Udpakning og kontrol af indhold:

Inden du fortsætter, skal du inspicere pakken for eventuelle skader under forsendelsen. Hvis du finder skader, skal du kontakte din lokale forhandler.

Derefter skal du kontrollere, at dit OtoClear øreskyllesystem er komplet.

Indholdet omfatter:

1. OtoClear sprayflaske på 470 ml (med temperaturmåler)
2. Flaskehoved/sprøjtehoved med lang spids påsat
3. 20 OtoClear éngangs spidser/tips
4. 1 øreskyllekar til opsamling

Hvis der mangler noget, bedes du kontakte din forhandler.

Anvendelsesformål:

OtoClear er beregnet til at skylle ørevoks og/eller fremmedlegemer ud af patientens øregang uden at forårsage skade.

Før du begynder:

Før anvendelse anbefaler det at undersøge øregangen og trommehinden med et otoskop og noter typen og placeringen af ørevoksen. Hårdt eller akkumuleret voks kan kræve et cerumenolytisk middel.

ADVARSEL: Udfør IKKE skylning, hvis trommehinden er perforeret, eller hvis der er tympanostomi-dræn til stede. Afbryd straks skylningen, hvis der opstår blødning, irritation eller andet traume i øregangen eller trommehinden.

Bionix sprayflaske monteringsvejledning:

1. Tag sprayflasken og sprøjtehovedet ud af emballagen.
2. Fyld flasken med kropstempereret vand. Bemærk: hvis temperaturen af vandet er over 54 grader C, vil der komme en blå markering. Er vandet under 27 grader C vil det ikke blive registreret på temperaturmåleren.
3. Efter påfyldning af vand, tag da fat i flaskehovedet, og før røret ned i åbningen på vandbeholderen, indtil det er sat helt ned.
4. Peg den spidse ende af flaskehovedet, i samme retning som den største del af sprayflasken.
5. Fastgør flaskehovedet ved at dreje den blå plastikring i bunden af flaskehovedet med uret, indtil den er helt stram.
6. Påsæt OtoClear tips ved at tage fat i spidsen (som vist), og drej på adapterens luer-lock-lukning, indtil den stopper. Luer-lock er en lukning med en twist-lock mekanisme, der giver en lækagesikker forbindelse.



Brugsvejledning til Bionix øreskyllesystem:

1. Påfyld vand på flasken. Sørg for, at temperaturmåleren på flasken viser "OK", for at sikre at vandet har den rette temperatur. Brug IKKE for koldt eller varmt vand, da det kan forårsage svimmelhed hos nogle patienter.
2. Afprøv enheden ved at sprøjte lidt ned i en vask.
3. Sæt OtoClear-spidsen helt ind i øregangen. OtoClear-spidsens udstrakte design forhindrer at spidsen kommer for langt ind i øret. Tip: Hvis du sætter OtoClear-spidsen helt i, hjælper det med at eliminere tilbageslag.
4. Placer øreskyllekaret under det ydre øre, for at opfange det vand der løber tilbage. OtoClear-spidsen leder 3 strømme af vand mod øregangens vægge og dermed væk fra trommehinden. Dette skaber en turbulent udskylning, der effektivt fjerner ørevoks. Udgangsportalerne modstår backsplash og udgangene leder vandet ned i øreskyllekaret.
5. Undersøg øregangen efter hvert skyl. Gentag skylningsproceduren efter behov. Nogle gange vil en stor voksprop ikke kunne komme ud gennem hullet. I disse tilfælde anbefaler vi brugen af en øreslynge, for at udtrække eventuelle rester af ørevoks.
6. Fjern eventuelt rester af vand i øregangen. Når proceduren er afsluttet, bortskaffes OtoClears éngangs spids/tip.

ADVARSEL: Manglende fjernelse af OtoClear-spidsen medfører risiko for krydskontaminering mellem patienter. Spidsen er designet til at være et éngangsprodukt.

Rengøring af Bionix OtoClear sprayflaske:

Det anbefales at rengøre OtoClear sprayflasken dagligt ved at følge nedenstående procedure.

1. Lav en opløsning af opvaskemiddel og vand.
2. Sørg for, at sprayflasken og sprøjtehovedet er helt drænet for vand.
3. Vask ydersiden af flasken og sprayhovedet med opvaskemiddel.
4. Fyld flasken med sæbeopløsningen og sæt sprayhovedet på igen.
5. Ryst sprayflasken og pump indtil sæbevandet løber ud.
6. Skyl ydersiden af sprayflasken med vand, indtil alt skum er fjernet.

7. Fjern sprayhovedet fra flasken, og hæld resten af sæbeopløsningen fra flasken.
8. Skyl og fyld flasken igen med rent vand - gentag indtil der ikke ses mere sæbeskum.
9. Fyld flasken med vand og sæt sprayhovedet på igen.
10. Pump sprøjtehovedet, indtil der ikke er synligt skum i det udledte skyllevand.
11. Fjern sprayhovedet fra flasken.
12. Pump sprøjtehovedet, indtil alt vand er ude.
13. Tøm alt vand fra flasken.
14. Tør de ydre overflader af flasken og sprayhovedet, og lad dem være adskilt så delene kan tørre.
15. Rengør øreskyllekaret med den samme sæbeopløsning. Skyl grundigt og tør.

Highlevel desinfektion af Bionix OtoClear sprayflaske:

Der anbefales highlevel desinfektion af Bionix sprayflaske efter brug, hvor der har været kontakt med blod, smitsomt materiale eller ikke-intakt hud.

1. Brug en af følgende highlevel desinfektionsopløsninger (HLD), der er kompatible med Bionix SprayWash-flasken:

- Orto-phtalaldehydopløsning (maksimalt 0,55 %)
- Accelereret hydrogenperoxidopløsning (2 % maksimum)
- Glutaraldehydopløsning (3,0 % maksimum)

2. Forbered HLD-opløsningen i henhold til producentens instruktioner.
3. Fjern sprayhovedet fra flasken.
4. Sørg for, at alt vand er blevet fjernet fra flasken og sprøjtehovedet.
5. Fyld sprayflasken med HLD-opløsningen, og sæt sprayhovedet på igen.
6. Pump sprayflasken, indtil HLD-opløsningen løber ud.
7. Fjern sprayhovedet og fyld flasken helt med HLD-opløsning.
8. Sæt sprøjtehovedet på igen.
9. Lad HLD-opløsningen trække i Bionix sprayflasken i henhold til HLD-producentens anvisning.
10. Efter flasken har stået i blød skal du fjerne sprayhovedet fra flasken og tømme HLD-opløsningen fra flasken.
11. Skyl de ydre overflader af flasken og sprayhovedet grundigt med vand.
12. Fyld flasken med rent vand og sæt sprayhovedet på igen.
13. Pump indtil halvdelen af flasken er tømt.
14. Gentag trin 11 – 13, indtil flasken er blevet skyllet tre gange.
15. Fjern sprayhovedet fra flasken.
16. Tøm alt vand fra flasken.
17. Pump sprøjtehovedet, indtil alt vand er ude.
18. Tør de ydre overflader af flasken og sprøjtehovedet, og lad dem være adskilt så delene kan tørre.
19. For at highlevel desinficere øreskyllekaret, gentag trin 1 og 2 og følg producentens instruktioner.