


Vejledning i montering af Seagull navneskilt

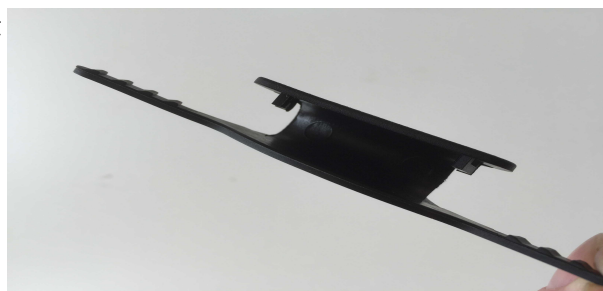

For at få monteret navneskiltet med den rigtige side udad skal du lægge dit stetoskop på et bord med lyttebøjlerne pegende nedad (som på foto 2), læg derefter dit navneskilt således at du har den side med den lille bue og flapperne nedad og skubbet ind over slangen der hvor lyttebøjlerne mødes. Det er vigtigt at montere korrekt idet skiltet ikke kan fjernes og monteres igen

Tag skiltet af slangen og blødgør flapperne som vist på foto 3

Sæt skiltet tilbage på slangen og skub flapperne igennem de små plastbøjler på indersiden af skiltet.

Hvis flappen driller og ikke vil igennem de små plastbøjler kan det hjælpe at skubbe nedad på flappen gennem de små aflange huller på bagsiden af skiltet.

Skub flapperne så langt ind som muligt



Færdigt resultat



Skriv din navn på de medfølgende klister etiketter eller print fra en dymo mærkat maskine

Hvis du ønsker at tage din navneskilt af igen skal du forsigtigt klippe flappen på navneskiltet i stykker, pas på ikke at beskadige slangen på dit stetoskop.

God fornøjelse med dit Seagull produkt.